

## SMART БРАСЛЕТ- ТЕРМОМЕТР HB-1



Инструкция по эксплуатации

Благодарим Вас за приобретение нашей продукции. Вы стали обладателем смарт браслета, который показывает время и температуру тела в режиме реального времени. Пожалуйста, ознакомьтесь с руководством пользователя перед началом использования.

Назначение: устройство для измерения температуры тела.

Не является медицинским прибором. Показания температуры тела носят исключительно справочный характер.



Техническая поддержка по телефону:

**8 (495) 005-87-67 8 (800) 775-87-67**



Техническая поддержка по электронной почте:


**support@jetdevice.com**

### Заряд батареи

При разряде аккумулятора смарт браслета, на экране появится символ BALO. Необходимо зарядить аккумулятор.

Пожалуйста, зарядите батарею перед использованием смарт браслет.

Используйте специальный USB кабель, входящий в комплектацию. Отделите смарт браслет от силиконового браслета и вставьте его в соответствующий разъем кабеля для зарядки. Подключите кабель к зарядному устройству с выходным напряжением 5 В либо к USB порту компьютера. Время заряда: около 2 часов.

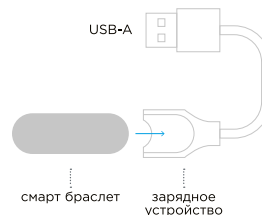

### Использование смарт браслета

1. Нажмите коротко на сенсорную кнопку для просмотра часов.
2. Нажмите далее на сенсорную кнопку для запуска термометра. Во время измерения температуры символ °C будет мигать. Необходимо подождать некоторое время для измерения температуры. После измерения символ °C перестанет мигать.
3. Если измеряемая температура слишком высокая (вне диапазона), на экране будет отображаться символ HI. Если измеряемая температура слишком низкая (ниже диапазона), на экране будет отображаться символ LO. Если измеряемая температура выше 37,5°C, на экране в левом верхнем углу экрана появится мигающий «тревожный» символ.
5. Измерение температуры тела будет некорректным, если пользователь до этого занимался спортом, принимал душ. В таком случае, перед измерением необходимо некоторое время (15-20 минут) отдохнуть, находясь в сухом помещении при комнатной температуре без ветра и кондиционера. Если браслет и пользователь находились в разных температурных областях длительное время (например, дома и на улице), необходимо выждать 20 минут перед измерением, находясь в одном помещении при комнатной температуре.
6. Через 5 секунд бездействия экран браслета погаснет.

### Настройка времени

Во время отображения времени, нажмите и удерживайте сенсорную кнопку 5 секунд. Браслет перейдет в режим установки часов. Нажимайте коротко кнопку, пока на экране не появится нужное показание часов. Снова нажмите и удерживайте сенсорную кнопку 5 секунд, браслет перейдет в режим установки минут. Нажимайте коротко кнопку, пока на экране не появится нужное показание минут. Нажмите и удерживайте сенсорную кнопку 5 секунд для сохранения данных и выхода из режима установки часов.

### Технические характеристики:

Диапазон измерения температуры тела: 34 — 42,5°C  
Точность измерения: 0,1°C  
Дисплей: 0,96", LCD  
Время работы батареи: до 90 дней  
Вес: 18 грамм (без ремешка)  
• Часы  
• Сенсорная кнопка управления

### Комплектация:

• Смарт браслет Jet Health HB-1  
• Кабель для зарядки  
• Инструкция по эксплуатации / гарантийный талон

### Правила и условия безопасного и эффективного использования товара

1. Использовать товар только по прямому назначению.
2. Не разбирать. Данное изделие не содержит частей, подлежащих самостоятельному ремонту. По вопросам обслуживания и замены неисправного изделия обращайтесь к фирме-продавцу.
3. Не предназначен для детей до 3-х лет. Может содержать мелкие детали.
4. Не опускать изделие в жидкости.
5. Не подвергать изделие вибрациям и механическим нагрузкам, способным привести к механическим повреждениям товара. В случае наличия механических повреждений никаких гарантий на товар не дается.
6. Не использовать при видимых повреждениях изделия. Не пользоваться заводом неисправным устройством.
7. Не брать в рот.
8. Не использовать изделие в промышленных, медицинских или производственных целях.
9. В случае, если транспортировка товара осуществлялась при отрицательных температурах, перед началом эксплуатации нужно дать товару согреться в теплом помещении (+16 — +25 °C) в течение 3 часов.
10. Не использовать устройство при вожении транспортного средства в случае, если устройство отвлекает внимание, а также в тех случаях, когда отключение устройства предусмотрено законом.
11. Специальные условия хранения, транспортировки и реализации не предусмотрены.

### ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Гарантийный срок службы с даты продажи — 12 месяцев.

|                   |  |
|-------------------|--|
| Модель:           | HB-1   |
| Дата продажи:     |  |
| Покупатель:       | С условиями гарантии ознакомлен. К комплектации и внешнему виду претензий нет. |
| Подпись продавца: |  |

Место для печати

Импортер в РФ / организация, уполномоченная на принятие претензий от потребителей: ООО «Эй энд Ди Ди Компани», Адрес: Россия, 10929, Москва, Михайловский проезд, дом 3, стр. 66, этаж 2, пом. 2, ком. 12.  
Сделано в Китае.  
Иготовитель: Оривер (Гонконг) Лимитед. Адрес: Офис А30, 9 этаж, Сильверкорп Интернашнл Тауэр 707-713 Нэтэн Роуд, Боннок, Кулун, Гонконг. Завод-изготовитель: Шэньчжэнь Хай Хе Джи Ченг Кежиро Сианг Гонг Си. Адрес: Рн 207, Блк А2, Интернет Индастриал Парк, Бао Юан Роад, Баоан, Шэньчжэнь, Китай.  
Срок службы: 5 лет.  
Срок годности не ограничен.  
Дата производства: см. на упаковке.

Список сервисных центров расположен на сайте [www.jetdevice.com](http://www.jetdevice.com)

Официальный сайт TM JET [www.jetdevice.com](http://www.jetdevice.com)

